



Q8

Cavitación
Radiofrecuencia

- Promueve la renovación de colágeno
- Modelado corporal con efecto prolongado


CÓMO FUNCIONA?

LA CAVITACIÓN

- Es generada por ondas ultrasónicas de 36 KHz.
- Las ondas ultrasónicas crean micro burbujas de vapor dentro de las adiposidades y en los líquidos intersticiales de la hipodermis.
- Las adiposidades implosionan con la consiguiente liberación de agua y grasa que serán metabolizados por el hígado.

LA RADIOFRECUENCIA


La Radiofrecuencia multipolar calienta las células de grasa simultáneamente en las capas adiposas profundas y superficiales.

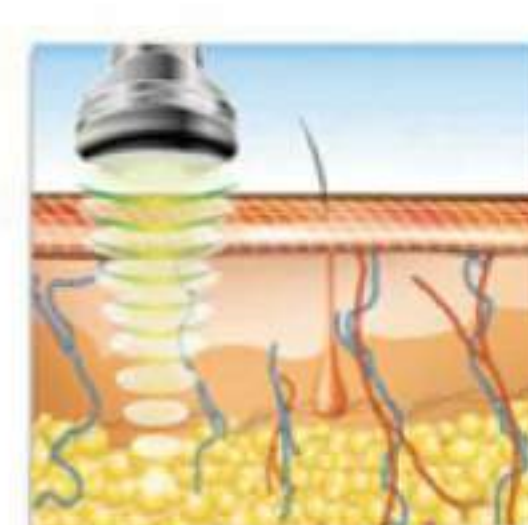

La grasa se acumula debajo de la piel



La cavitación es creada por ultrasonido de baja intensidad

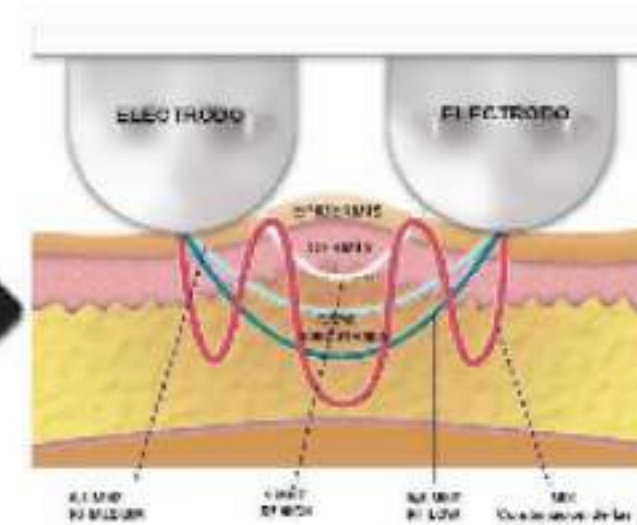

Los adipocitos muertos se drenan por el sistema linfático

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO

- Moldeado corporal con efecto prolongado.
- Destruye la grasa localizada.
- Disminuye la celulitis.
- Promueve la renovación de colágeno.
- Moldeado y tensado facial.
- Rejuvenecimiento.
- Tensado de la piel.

LIPOSUCCIÓN SIN CIRUGIA

- El Q8 es uno de los equipos ultrasónicos más avanzados y completos del mercado.
- El Q8 incluye la última cavitación ultrasónica a 36 KHz. y la tecnología más utilizada de Radiofrecuencia para obtener un efecto tensor.



CONTIENE:

- Moldeado corporal con efecto prolongado.
- Ayuda al metabolismo de la grasa localizada.
- Mejora la apariencia de áreas con celulitis.
- Promueve la renovación de colágeno.
- Moldeado y tensado facial.
- Tensado de la piel.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

NOMBRE	Q8 Sistema de Moldeado con Cavitación y Radiofrecuencia
Modelo:	AP-049
Salida máxima:	150W
Control de operación:	pantalla táctil color de 8"
Medidas:	59cm×47cm×48cm (L×W×H)

PARÁMETROS DE USO

Cabezal	Zona a tratar	Modo	Intensidad	Tiempo(min)
C36	Abdomen y cintura	0(Continuo)	70-100	20-30 min
	Mustos y brazos	/	60-100	20-30 min
TR80	Abdomen y cintura	/	50-70	20-30 min
	Mustos y brazos	/	50-70	20-30 min
TR60	Mustos y brazos	/	40-60	20-30 min
TR30	Cara	/	30-50	20-30 min
	Cuello y hombros	/	30-50	20-30 min



Publicidad dirigida a profesionales de la salud.
Cualquier evento adverso reportar a tecnovigilancia@tecnologiadermatologica.com
Registro Sanitario 0148E2021 SSA
Aviso de Publicidad 2315052002C00949

Importado y Distribuido por: ASPID S.A. DE C.V.
Carretera Toluca-Naucaupan Kilometro 52.5,
Lote 5 B, Parque Industrial Inn, San Mateo Oztzacatipan,
Toluca, C.P. 50220, Estado de México, México. TEL: 55.7476.5212
• info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

Q8